



# Desinfecte su nariz en 2 sencillos pasos y *sin dolor*

## Se ha demostrado que eliminar los gérmenes de la nariz previene las infecciones posoperatorias


Los gérmenes de la nariz pueden transmitirse fácilmente, lo que provoca infecciones en heridas abiertas e incisiones. Por eso utilizamos la fotodesinfección nasal Steriwave™ para eliminar los gérmenes de la nariz antes de su intervención.

Steriwave es un tratamiento indoloro en 5 minutos que destruye los gérmenes nasales (incluidos el SARM y otras superbacterias), lo que reduce significativamente el riesgo de infección.

### El tratamiento de 2 pasos de Steriwave dura solo 5 minutos


#### 1 Líquido azul

Primero, el líquido azul se aplica con cuidado a cada fosa nasal.

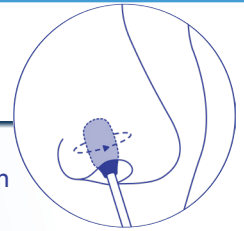

#### 2 Luz roja no térmica

A continuación se utiliza luz roja no térmica para activar el líquido durante unos minutos.

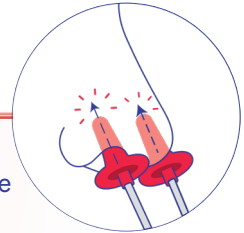

## Expectativas

El tratamiento Steriwave no está asociado con dolor ni molestias. Algunas personas sienten un leve hormigueo o cosquilleo y, mientras la luz roja está encendida, puede notarse una ligera sensación de calor. Estas sensaciones son normales. El tratamiento cesa cuando la luz se apaga automáticamente. Si siente dolor o molestias durante el tratamiento, informe al personal médico.



*Escanee el código QR para ver un vídeo sobre cómo funciona la fotodesinfección Steriwave*

## Información importante de seguridad

Steriwave se ha utilizado en más de 150 000 aplicaciones en hospitales y clínicas canadienses durante los últimos 10 años. No se han notificado acontecimientos adversos significativos. No utilice Steriwave si tiene alergia al azul de metileno o a la clorhexidina, ni tampoco si tiene defectos anatómicos nasales que impidan el fácil acceso a las fosas.